

* * 2016年2月（第2版 新規記載要領に基づく改訂）

* 2012年6月（第1版）

類別：医04 整形用品
 一般医療機器 一般名称：医療用不織布(JMDNコード：34655000)

プラスモイストDCR

再使用禁止

【警告】

明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に使用すること。（感染を悪化させる恐れがある。臨床的感染を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら本品を併用することが有益と医師が判断する場合には、局所の観察を十分に行い、慎重に使用すること。）

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


1.材質

ポリエチレン、ポリプロピレン、セルロース等

2.形状・構造

不織布を挟んで、両面にポリエチレンからなるメッシュシートが付与されたシート材で、ロール形状である。

〈断面模式図〉

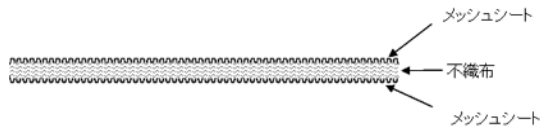

3.原理

メッシュシートは全面が微細孔を有するセル構造で、本品と創部との固着を防ぐ。過剰な浸出液等が生じる場合は不織布が浸出液を吸収することで、健常皮膚部での浸出液に起因する浸軟、カブレ等の皮膚障害を抑制する。また、本品は通気性に優れ、使用時の健常皮膚部の発汗や不感蒸泄によるムレを軽減する。

4. サイズバリエーション* *

製品番号	規格	入数 (ロール)
DARR	125mm×3000mm	1

【使用目的又は効果】

創傷面を被覆・保護する。

【使用方法等】

本品はディスプレイ製品であるので、一回限りの使用のみで再使用はできない。

- 創部を生理食塩液又は消毒液等で十分に洗浄し、汚れや異物を取り除く。
また、消毒液を用いた場合は消毒液が残らないように生理食塩液等で十分に洗い流す。
(本品交換時にも必ずこの処置を行うこと。)*
- 取り出し口にあるミシン目を破り、ロールの端を引き出す。

3.周囲の健常皮膚も十分に被覆できる長さに欠等でカットする。

4.本品を創部に当て、包帯、ネット、サージカルテープ、フィルムドレッシング等で本品が動かない程度に固定する。なお、本品は表裏共に同形状のメッシュシートで構成されているため、表裏の区別なく創部に使用できる。

【注意】

消毒薬や脱色剤、有機溶剤との併用はしないこと。
また、原則、軟膏、クリーム、オイル等の薬剤と併用しないこと。

5.本品は固着し難いが、除去が困難な場合には、本品と創面との接触面に生理食塩液等をシリンジ等で流すか又は生理食塩液等をしみこませたガーゼ等でぬらし、少しずつ剥がすこと。

6.通常、浸出液がもれ出すまで、連続で使用できるが、早めの交換を推奨する（少なくとも1日1回の本品の交換と創部の洗浄操作を推奨する）。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 創に本品が原因と推察される感染が起きた場合には直ちに使用を中止し、適切な治療を行う。
- 皮膚障害と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 創の観察を十分に行い、浸出液の量や創の状態に応じ、適切な交換及び処置を行うこと。
- 眼の周囲、口腔内などの粘膜器官には使用しないこと。

その他の注意事項

- 開封前に包装が破損又は汚損している場合は使用しないこと。
- 変色、剥離等が認められる場合は、使用を中止すること。
- 本品は未滅菌である。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光・高温多湿を避け、室温で清潔な場所に保管

有効期間

使用期限：製品包装に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社瑞光メディカル

〒566-0062

大阪府摂津市鳥飼上四丁目3番50号

電話：072-653-8877

【お問合わせ先】

株式会社瑞光メディカル

電話：072-653-8877（平日8:30～16:45）

E-mail：plus_moist@zuiko.co.jp