

\* \* 2016年12月（第3版 新規記載要領に基づく改訂）  
\* 2014年 9月（第2版）

類別：医04 整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏(JMDNコード：34864000)

## プラスモイストK

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】 再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1.形状・構造

粘着テープに多層構造のシート材からなるパッドがついて  
います。パッドは、傷口接触面である透過層、吸水性能を有す  
る吸収層の2層からなり、更に、透過層は、メッシュシート  
と透過性シートで構成されています。  
パッドと粘着テープを覆う形で剥離紙が付加されています。

##### 2.材質

パッド：ポリエチレン、ポリプロピレン、セルロース等  
粘着テープ：ウレタン不織布、シリコーン・アクリル粘着剤  
剥離紙：紙、シリコーン樹脂

##### 3.原理

パッドが傷口を覆い、保護します。パッドの傷口接触面とな  
るメッシュシートは、全面に微細孔を有したセル構造をして  
おり、傷口の乾燥やかさぶた形成の結果生じる本品と傷口と  
の固着を防ぎます。また、過剰な浸出液（傷口から出る体液）  
等が生じる場合は吸収層で吸収し、正常な皮膚部での、浸出  
液によるふやけ等の皮膚障害を生じにくくします。  
撥水性のある粘着テープは、パッドを傷口にしっかり固定し、  
また、皮膚から発散する水分を透過させるため、正常な皮膚  
がムレにくくなります。  
パッドと粘着テープの粘着面を保護するため剥離紙がついて  
いますが、使用時には容易にはがすことができます。

##### 4.サイズバリエーション\*\*

製品名	サイズ(mm)	
	パッド	テープ
ふつうサイズ	13×22	25×72
ビッグサイズ	30×35	50×60

#### 【使用目的、又は効果】

傷の被覆及び保護

#### 【使用方法等】

一度使用したものは再度使用しないでください。  
傷口を水道水等でよく洗い、水気をふき取った後、パッド  
を傷口に当て、粘着テープをしっかり押さえて貼ってくだ  
さい。  
最初つきにくく感じるがありますが、すぐに皮膚にな  
じんでフィットします。  
はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆ  
っくりはがしてください。

#### 【使用上の注意】

- 次の方は、使用前に必ず医師に相談してください。
  - ・糖尿病や血行障害の治療を受けている方
  - ・感染を起こす可能性のある傷（低温やけど、深い傷、動  
物などに咬まれた傷、ガラス・木片・砂などの異物が入っ  
ている傷）に使う方
- 次のところには使用しないでください。\* \*
  - ・感染した傷（傷口の周囲が赤い、熱・はれがある、ズキ  
ズキした痛みが続く）
  - ・膿をもつ等の異常がある傷
  - ・にきびやとびひ等の皮膚感染
  - ・眼の周囲、粘膜
  - ・成因不明の傷
- 本品の使用により、強い痛み、傷口の周囲が赤くはれる、  
発疹、かゆみ等が生じた場合は使用を中止し、医師または  
薬剤師に相談してください。
- 消毒液を使用した場合は、水道水等で十分に洗い流して  
ください。
- パッドサイズより大きな傷には使用しないでください。
- 粘着面を傷口に貼らないでください。
- 浸出液がもれた場合は、新しいものに貼り替えてくださ  
い。
- 長時間貼付せず、少なくとも1日1回交換してください。
- 個包装が破れたり、開けられたものは使用しないでくださ  
い。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 保管方法

直射日光を避け、なるべく湿気の少ない、小児の手の届か  
ないところに保管してください。

##### 有効期間

使用期限：製品包装に記載（自己認証による）

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
株式会社瑞光メディカル  
〒566-0062  
大阪府摂津市鳥飼上4丁目3番50号

#### 【お問い合わせ先】

株式会社瑞光メディカル  
電話：072-653-8877  
(8:30～16:45土・日・祝日を除く)