

## 被覆・保護例



✓自由にカットでき、創部に応じたドレッシングが可能

## 被覆・保護例



✓展開図的にカットすることにより、  
3次元的なドレッシングが可能

## 被覆・保護例



(1) 爪部より少し大きめに切ったプラスモイスト®にサージカルテープを貼り付ける。



(2) 爪部にプラスモイスト®を貼り付ける。このときプラスモイスト®の上部が爪先から1/3程出るようにする。



(3) プラスモイスト®の上部を爪を覆うように折り曲げ、端の余分を切り落とす。



(4) 切り落とし後の状態。

## 被覆・保護例



(5) プラスモイスト®の上部にサージカルテープを貼り付ける。



(6) 爪を覆うように折り曲げ、サージカルテープで固定する。




(7) 爪部保護の完成。

## 被覆・保護例



(1) プラスモイスト®に指が通る程度の切込みを入れる。

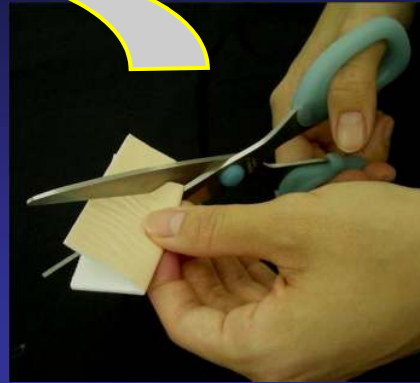

※折ってはさみで加工することが可能です！



(2) 切込み部に指を通し、手の平部をサージカルテープにて固定する。



(3) 指腹部をサージカルテープにて固定し完成。

## 被覆・保護例




✓ 広範囲であっても、1枚で大きく被覆・保護が可能

## 被覆・保護例



- ✓ 切込みを入れることで、湾曲形状に合わせる
- ✓ 傷の大きさに合わせて必要量カットでき経済的

## 被覆・保護例

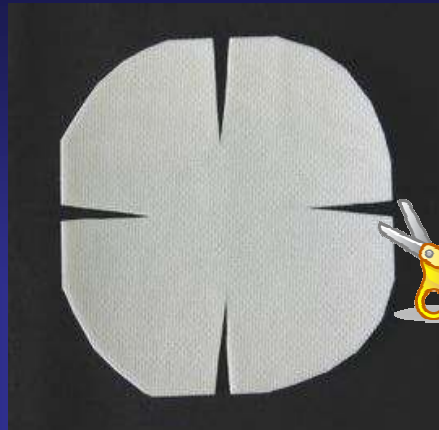

簡単にハサミでカット！

(1) プラスモイスト®にはさみで切込みを入れる。




(2) ヒザ、ヒジの部分に当てる。



(3) ネット、サポーター等で固定する。

# 被覆・保護例

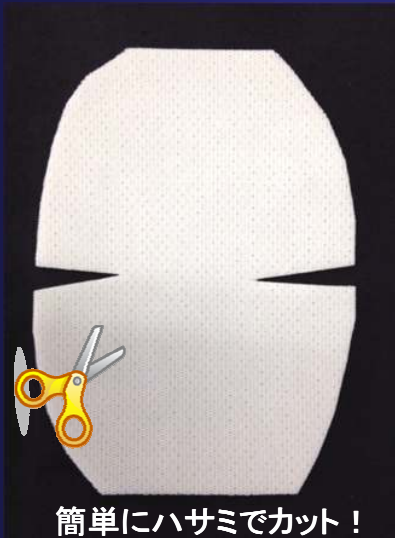

簡単にハサミでカット！

(1) プラスモイスト®にはさみで切込みを入れる。



(2) かかとの部分に当て、テープで簡単に固定する。



(3) ネット、サポーター等で固定する。

# 被覆・保護例



折り曲げ端部をハサミでカット



- ✓ 処置を進めながらフィットするようにハサミでカット可
- ✓ 指先や足爪のはがれの保護にも効果的